



DELEGERING PARIBOY

Dokumentägare: Jasmina Ikanovic
Gäller för: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen, Vård- och äldreomsorgsförvaltningen/
Version: 4
Senast reviderad: 2024-12-30
Revidering av dokumentet sker kontinuerligt.

Pariboy är ett inhalationshjälpmedel. Denna används för att kunna ge patienten snabb och effektiv behandling vid olika obstruktiva luftvägssjukdomar som astma och KOL. Genom att omvandla läkemedlet till en fin dimma möjliggör Pariboy en effektiv administrering direkt till lungorna, vilket ger omedelbar symtomlindring.



Handhavande och förvaring

Pariboy består av tre delar, dessa är munstycket, anslutningsslangen och kompressorn. Kompressorn drivs genom ett eluttag och sätts på genom on/off knappen.



Inför inhalationen

Noggrann handhygien krävs före varje inhalation för att minska risken för att bakterier och virus förs in via inhalationen och orsakar infektion, exempelvis lunginflammation.

Förberedelser

Koppla ihop pariboy och kompressor med anslutningsslangen. Se till att kompressorn står på ett stabilt underlag. Anslut kompressor till elnät. Töm inhalationslösningen i pariboy- kammaren och stäng locket ordentligt för att förhindra läckage eller förlust av medicinen.

Inhalationslösningen ska alltid förvaras i originalförpackning vid en temperatur på högst 25 grader och skyddas från solljus eftersom den är ljuskänslig.


För att säkerställa optimal effektivitet och säkerhet bör endosbehållare med läkemedlet användas direkt efter öppnandet.

Om en endosbehållare är delvis använd, öppnad eller skadad ska den kasseras.



Inhalation

Ta munstycket mellan tänderna och låt läpparna sluta tätt om munstycket. Om mask används, se till att den sluter tätt. Andas in långsamt och djupt genom munstycket/masken. Andas sedan ut långsamt och fullständigt.

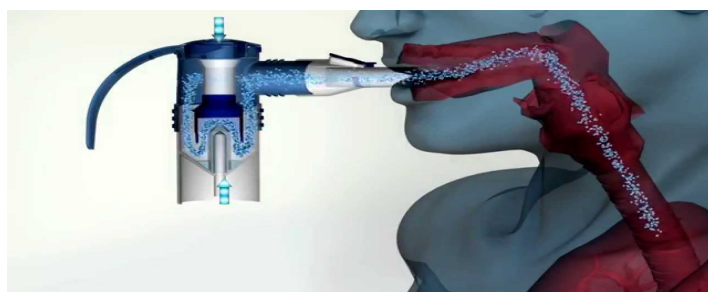

Ett förändrat ljud från pariboyen signalerar att inhalationen kan avslutas. Stäng av apparaten, ta bort pariboyen från slangen och ta ur kontakten från elnätet.



Rengöring

Koppla isär munstycket och läkemedelsbehållaren, skölj noggrant med varmt vatten och diskmedel i cirka 5 minuter efter varje användning.

Skaka försiktigt bort överflödigt vatten., lägg på en ren, torr handduk och låt lufttorka till nästa användning.



Desinficering

Desinficering görs efter rengöringen 1 ggr/dag.

Desinficera de olika delarna av pariboyen genom att koka dem i vatten i minst 5 minuter. Använd ren kastrull och färskt dricksvatten. Lägg delarna på ett torrt, rent och absorberande underlag och låt dem torka fullständigt.

Förpacka sedan pariboyen i en ren och luddfri duk, exempelvis diskhandduk, mellan användningarna.

Förvara pariboyen så att den inte under längre tid utsätts för solljus.

Länk: [Pari Boy® – Instruktionsfilm / Användarinstruktioner \(medicininstruktioner.se\)](#)